

Go Green With Envy

Gentle on the skin
Gentle on your trays
Gentle on the environment



pH  neutral


Whip Mix Green Envy™ tray cleaner is a natural way of removing alginate residues from impression trays.

- Dissolves residue as it interacts, instead of reacts, with soils and surfaces.
- pH Neutral mixture is gentle on skin and biodegradable.
- Does not corrode metal trays.
- The 1 lb. jar provides cleaning for more than 200 trays.

Simply mix Green Envy™ with water according to the directions, immerse the instruments for 15-30 minutes, then brush or rinse with warm water. The only thing left behind is a fresh, light citrus scent.



Mix 2 cap fulls of Green Envy tray cleaner in 2 cups (16 oz.) of lukewarm water.

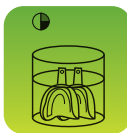

Immerse instruments for 15-30 minutes.



Rinse or brush off with warm water, and you're done.

Green Envy™ TRAY CLEANER

Item No. 09637
1 lb. (.45 kg) Jar

Call Today at
800-626-5651
to Order.

Connect with us!





Vaya Verde Con Envy



Fácil para usted
Fácil para los instrumentos
Fácil para el medio ambiente

Muchos productos para limpiar cubetas contienen ingredientes activos, como carbonato de sodio que puede causar quemaduras, e irritar los ojos. La inmersión prolongada de cubetas metálicas en esta soluciones también puede causar corrosión. Además, la liberación de estos productos químicos peligrosos en el sistema de agua pueden ser tóxicos para las plantas y animales acuáticos.

Limpia sin productos químicos perjudiciales

Green Envy™ disuelve alginato y residuos de yeso por interacción en lugar de atacarlos con químicos corrosivos. Los residuos se enjuagan-no hay necesidad de raspar o socavar.

pH neutro

Green Envy™ no es ni ácido ni alcalino y es suave para la piel. Se puede manejar con seguridad y no causa corrosión a los instrumentos de metal.

No tóxico

Green Envy™ no contiene componentes tóxicos que representen un riesgo para los usuarios. Esto también reduce los riesgos en el flujo de residuos municipales y daño al ecosistema por productos químicos persistentes.

Bio degradable

Green Envy™ se descompone por micro-organismos en compuestos más simples, más estables. Se descompone sin ocasionar contaminación ambiental.

Fácil de usar

Simplemente mezcle Green Envy™ con agua de acuerdo a las instrucciones, sumerja los instrumentos de 15-30 minutos, luego cepille o enjuague con agua tibia. Lo único que queda atrás es un ligero y fresco aroma a cítricos.

Green Envy™
LIMPIADOR
DE CUBETAS

Ítem No. 09635
2.2 lb. (1.0 kg.) Jarra



RESTORATIVE ORAL HEALTH
Whip Mix Corporation
361 Farmington Avenue
Louisville, KY 40209
www.whipmix.com